

Reisetipps

Häufig gestellte Fragen im LifeScan Kundenservice



ABBILDUNGEN
LIFE SCAN
LUFTHANSA
FLORIAN MÜLLER
4T WERBEAGENTUR

› Wie lagere ich meine Teststreifen in heißen Ländern?

Die Angabe, die Teststreifen unter 30 Grad zu lagern, bezieht sich auf eine längere Lagerdauer. Die Teststreifen die Sie momentan in Gebrauch haben, können Sie auch bei höheren Außentemperaturen bei sich führen. Achten Sie jedoch darauf, die Teststreifen nicht direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Schützen Sie die Teststreifen, indem Sie die Dose in ein Handtuch oder T-Shirt wickeln.

Verschiedene Hersteller bieten auch Thermotaschen an, die Ihre Teststreifen schützen:

- › Loom-Company
Wichmannstraße 4
22607 Hamburg
Tel. 040/897 16 912
www.loom.de

FRIO-Taschen erhalten Sie über:

- › Florian Müller
Wichmannstraße 4/Haus 9
22607 Hamburg
Tel. 0800/6622000
service@florian-mueller.de
www.florian-mueller.de
- › TK Pharma Trade
Gewerbepark Gaste
49205 Hasbergen
Tel. 0800/4488900
info@tk-pharma.de
www.tk-pharma.de
- › Ultra Pharm
Frankfurter Straße 29
69206 Bad Rothenfelde
Tel. 0800/1008611
info@ultra-pharm.de
www.ultra-pharm.de



OneTouch® Ultra® von LifeScan liefert Ihnen beim Bergsteigen korrekte Messwerte



Reisehilfen: Frio-Taschen und internationaler Diabetikerausweis



Auch im Flugzeug können Sie sich auf Ihre gemessenen Werte verlassen



Die Teststreifen von LifeScan sind nahezu weltweit erhältlich

› Kann ich beim Bergsteigen mit meinem Messgerät arbeiten?

Die Blutzuckermessung ist unter anderem an das Vorhandensein von Sauerstoff gebunden, welcher in großen Höhen abnimmt. OneTouch® Ultra® liefert Ihnen bis zu einer Höhe von 3.000 Metern korrekte Werte.

› Wo bekomme ich einen internationalen Diabetikerausweis?

› Verlag Kirchheim + Co GmbH
Kaiserstraße 41
55116 Mainz
Telefon 06131/960 70-0
Fax 06131/960 70-70
info@kirchheim-verlag.de
www.kirchheim-verlag.de

› Sind die Blutzuckerwerte bei der Messung im Flugzeug korrekt?

Durch den Druckausgleich in Flugzeugen können Sie auch hier eine korrekte Blutzuckerbestimmung durchführen.

› Erhalte ich in meinem Urlaubsland auch OneTouch® Ultra®-Teststreifen?

Die Teststreifen von LifeScan sind nahezu weltweit erhältlich. Sicher haben wir auch an Ihrem Urlaubsziel eine Niederlassung und einen Kundenservice, der Ihnen gerne weiterhilft. Erfragen Sie einfach vor Ihrer Reise die für Sie wichtige Kontaktadresse.

Rufen Sie uns einfach unter der gebührenfreien Rufnummer 0800/70 77 007 an.

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, sich aus dem Ausland direkt an uns zu wenden. Sie erreichen uns telefonisch dann unter der Rufnummer 0049/6223/77 777 oder per E-Mail unter service@lifescan.de. Damit Ihnen keine hohen Kosten entstehen, teilen Sie uns einfach die Rufnummer mit, unter der wir Sie erreichen können und wir rufen Sie zurück.

Sie sehen, auch auf Reisen sind Sie mit OneTouch® bestens versorgt. ■

BEITRAG

SIMONE HAUKE,
LIFESCAN KUNDENSERVICE



KONTAKT

LIFESCAN KUNDENSERVICE
gebührenfrei

IN DEUTSCHLAND
TELEFON 0800/70 77 007
IN ÖSTERREICH
TELEFON 0800/244 245

Mo. – Do. 8.00 – 17.00 UHR
Fr. 8.00 – 16.00 UHR
WWW.LIFESCAN.DE