


Blutzuckerspitzen im Griff mit OneTouch® Ultra® 2

BEITRAG | ABBILDUNGEN LIFE SCAN

OneTouch® Ultra® 2 bietet die hilfreiche Funktion, Messwerte zu markieren, ob vor oder nach einer Mahlzeit gemessen wurde. Wie kann ich diese Funktion aktivieren?

Und wie markiere ich meine Messwerte entsprechend vor oder nach der Mahlzeit?

Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, haben Sie nun die Möglichkeit, Ihren Wert direkt nach der Messung zu markieren.



OK
Zum Einschalten OK-Taste drücken.

Im HAUPTMENÜ ▼ drücken und SET UP wählen. Zum Bestätigen OK drücken.

Mit ▲ oder ▼ MARKER/ANMERK. wählen. Zum Bestätigen OK drücken.

▲ oder ▼ drücken um Antwort zu markieren. JA wählen um Einstellung zu ändern. OK drücken.



Das Testergebnis wird angezeigt.

Bei der Anzeige des Testergebnisses ▲ drücken um zum MARKER FÜR MAHLZEITEN zu kommen.

Mit ▲ oder ▼ VOR oder NACH auswählen. Zum Bestätigen OK drücken.

Nochmals OK drücken um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.

**HABEN SIE WEITERE FRAGEN?
RUFEN SIE UNS EINFACH AN.
UNSER LIFE SCAN-SERVICETEAM
STEHT IHNEN UNTER UNSERER
GEBÜHRENFREIEN RUFNUMMER
GERNE ZUR SEITE! WIR FREUEN
UNS AUF IHREN ANRUF!**

KONTAKT
LIFE SCAN SERVICE
GEBÜHRENFREI

IN DEUTSCHLAND
TELEFON 0800/70 77 007
IN ÖSTERREICH
TELEFON 0800/244 245

Mo. – Do. 8.00 – 17.00 UHR
FR. 8.00 – 16.00 UHR
WWW.LIFESCAN.DE

› Sie können Ihre gespeicherten Messwerte auch später markieren. Schalten Sie dazu Ihr OneTouch® Ultra® 2 durch Drücken der OK-Taste ein. Bestätigen Sie durch Drücken der OK-Taste das dunkel unterlegte Feld LETZTES RESULTAT. Sollte es nicht dunkel unterlegt sein, wählen Sie es durch Drücken der Pfeiltasten aus. Ihr letztes Messergebnis wird nun angezeigt. Durch Drücken der Pfeiltaste nach oben gelangen Sie in den Marker für Mahlzeiten. Wählen Sie mittels der Pfeiltasten VOR MAHLZEIT bzw. NACH MAHLZEIT aus und bestätigen Sie wiederum durch Drücken der OK-Taste. Durch nochmaliges Drücken der OK-Taste gelangen Sie wieder in das Hauptmenü.