

ONETOUCH[®] VITA[™]

Sistema di monitoraggio
del glucosio nel sangue

Inizia qui a:

Conoscere il tuo sistema

*Controllare le impostazioni
dello strumento*

Eeguire il test

Guida rapida

Conoscere il tuo OneTouch® Vita™


Sistema di monitoraggio del glucosio nel sangue

STRUMENTO




Leggere attentamente le istruzioni dettagliate nel Manuale Utente OneTouch® Vita™.

STRISCIA REATTIVA

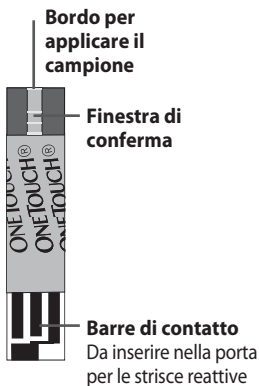

CARICARE IL DISPOSITIVO PUNGIDITO

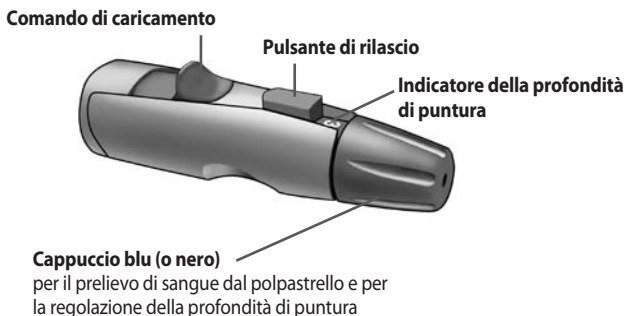

Controllare le impostazioni dello strumento

1 Tenere premuto **OK** fino all'accensione dello strumento.

Dopo la schermata di avvio nera, appare la schermata IMPOSTAZIONI.

Se la lingua preimpostata, la data e l'ora sono corrette, premere **OK** per tornare al MENU PRINCIPALE.

IMPOSTAZIONI
ITALIANO
27/FEB/08
14:07
mg/dL
OK
CAMBIARE

2 Se un'impostazione non è corretta, selezionare **CAMBIARE** e premere **OK**. Apparirà allora la schermata LINGUA.

3 Premere **▲** o **▼** per evidenziare la lingua che si desidera e premere **OK**.

Premere **OK** dopo aver effettuato la selezione, conferma ogni impostazione e fa passare alla schermata successiva.

Se ad un certo punto si effettua la selezione sbagliata, tenere premuto semplicemente **OK** fino allo spegnimento dello strumento. Quindi riaccendere lo strumento e ripartire dalla fase 1.

LINGUA
ENGLISH
ITALIANO

- 4** Nella schermata **DATA E ORA**, premere **▲** o **▼** per modificare l'anno e premere **OK**.

Ripetere questi passaggi per selezionare il mese e il giorno.

I formati della data e dell'ora sono stati preimpostati. Tali impostazioni non possono essere modificate.

DATA E ORA
DATA: 27 / FEB / 2008
ORA: 14 : 07

- 5** Premere **▲** oppure **▼** per impostare l'ora e premere **OK**.

Ripetere questo passaggio per impostare i minuti.

Premere **OK** dopo aver impostato i minuti porterà alla schermata **IMPOSTAZIONI**.

DATA E ORA
DATA: 27 / FEB / 2008
ORA: 14 : 07

- 6** Premere **OK** per salvare le impostazioni e ritornare al **MENU PRINCIPALE**.


Per regolare un'impostazione, selezionare **CAMBIARE** e premere **OK** per ritornare alla schermata **LINGUA**. Seguire i passaggi 3-5 per effettuare i cambiamenti desiderati.

IMPOSTAZIONI
ITALIANO
27/FEB/08
14:07
mg/dL
OK
CAMBIARE


Eeguire il test (prelievo di sangue dal polpastrello)

Preparare il dispositivo pungidito

- 1 Togliere il cappuccio blu/nero.

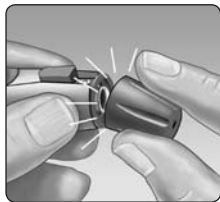

- 2 Inserire la lancetta e togliere il cappuccio protettivo. Applicare nuovamente il cappuccio blu/nero.

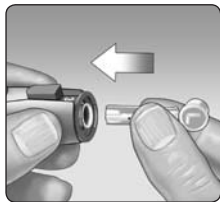


3 Ruotare il cappuccio per regolare la profondità di puntura.

Utilizzare numeri più grandi per una puntura più profonda.



4 Far scorrere all'indietro il comando di caricamento fino a farlo scattare.

Lavare sempre il sito della puntura con acqua e sapone. Risciacquare e asciugare accuratamente.

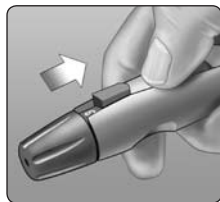

Eeguire il test (prelievo di sangue dal polpastrello) (continuazione)

Applicare il campione e ottenere il risultato

- 1 Inserire una striscia reattiva come mostrato.**


Lo strumento si accenderà.

Aspettare che la schermata APPLICA CAMPIONE appaia sullo schermo.




- 2 Tenere il dispositivo pungidito contro il lato del dito e premere il pulsante di rilascio.**

Massaggiare la punta del dito per ottenere una goccia di sangue rotonda.

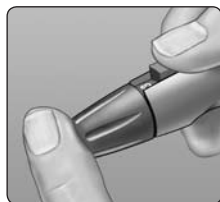


- 3 Avvicinare la striscia reattiva in modo tale che il canale capillare arrivi quasi a toccare l'estremità della goccia di sangue.**

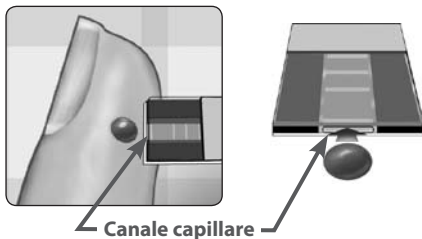

4 Tenere premuto il canale all'estremità della goccia di sangue.

Quando la finestra di conferma viene riempita, lo strumento esegue il conto alla rovescia da 5 a 1.

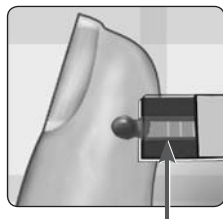

Finestra di conferma



(Esempio)

Il livello di glucosio nel sangue viene visualizzato sullo schermo, assieme all'unità di misura, la data e l'ora del test. Verrà visualizzata anche l'opzione indicazione pasto, DOPO IL PASTO?. Vedere il Manuale Utente per le istruzioni sull'utilizzo delle indicazioni relative ai pasti.

Non rimettere la striscia reattiva utilizzata nel flacone dopo aver eseguito un test.

Complimenti!

Ha completato con successo il primo test di glucosio nel sangue con lo strumento OneTouch® Vita™.

Ora, per attivare la garanzia dello strumento, spenda qualche minuto a compilare e spedire la cartolina di garanzia.

Può anche registrare lo strumento on line su www.LifeScan.it.

I dispositivi LifeScan per la determinazione del glucosio nel sangue sono conformi alle seguenti direttive EU:

IVDD (98/79/EC):



Strumento per la determinazione del glucosio nel sangue, strisce reattive e soluzione di controllo.

MDD (93/42/EEC):



Lancette



Dispositivo per autoprelievo



LifeScan, Inc.
Milpitas, CA 95035 U.S.A.



LifeScan Regulatory Affairs Europe
Division of Ortho-Clinical Diagnostics France
1, rue Camille Desmoulins
92787 Issy-les-Moulineaux,
Cedex 09, France

Distribuito da:
LifeScan Italia
Divisione della Johnson & Johnson
Medical S.p.A.
Via del Mare, 56
00040 Pratica di Mare (RM), Italia
Sede Operativa:
Via Chiese, 74 - 20126 Milano, Italia
www.LifeScan.it

Rivolgersi al Servizio Clienti al
numero **800 822 000**
oppure
visitare il nostro sito
www.LifeScan.it



© 2008 LifeScan, Inc.
Rev. date: 03/2008



AW 06533701A