

Calibrazione dello strumento

Calibrare lo strumento quando lo si utilizza per la prima volta e, in seguito, ogni volta che si utilizza un nuovo flacone di strisce reattive OneTouch® Ultra™.

FASE 1 Accesso alla modalità di calibrazione.

Inserire una striscia reattiva per accendere lo strumento. Apparirà "OneTouch UltraSmart", seguito dal codice di calibrazione.

FASE 2 Osservazione del numero di codice.

Sullo schermo appare il numero di codice.

FASE 3 Corrispondenza dei codici.

Confrontare il codice presente sullo schermo dello strumento con quello indicato sul flacone delle strisce reattive. Se corrispondono, avviare il test. In caso contrario, passare alla Fase 4.

FASE 4 Calibrazione dello strumento.

Scorrere su o giù con il pulsante freccia. Lo strumento è pronto per il test.

Riepilogo del test

NOTA: prima di eseguire il test, lavarsi le mani con acqua calda e sapone. Risciacquare e asciugare accuratamente.

FASE 1 Inserimento della striscia reattiva.

Inserire la striscia reattiva finché non si blocca. Lo strumento si accende automaticamente.

FASE 2 Selezione della modalità di test.

Con il pulsante freccia selezionare "Appl. sangue" (Applica sangue) per il campione prelevato dalla punta del dito o "Sito alternativo" per il campione prelevato dal braccio. Non selezionare la modalità Soluzione di controllo quando si esegue il test del sangue. L'errata selezione della modalità di test può comportare un errore nel calcolo delle medie relative al sangue.

FASE 3 Applicazione del campione.

Toccare con la goccia di sangue la stretta scanalatura sul margine superiore della striscia reattiva.

FASE 4 Riempimento della finestra di conferma.

Prima del conteggio alla rovescia dello strumento, accertarsi che la finestra sia piena. Se la finestra non è piena prima che lo strumento inizi il conteggio alla rovescia, ripetere il test con una nuova striscia reattiva.

FASE 5

Risultati accurati in soli 5 secondi.

Simboli e messaggi dello schermo

Codice

Verifica Codice ▲▼

1) Nuovo strumento senza codice di calibrazione. Inserire il codice nello strumento; oppure
2) l'alimentazione dello strumento si è interrotta brevemente e ci si trova in modalità d'impostazione. Inserire nuovamente il codice di calibrazione.

14 Set 02 9:45
415
mg/dL
Controllare i chetoni
Commento? Prem. OK ▲▼

14 Set 02 9:45
23.0
mmol/L
Controllare i chetoni
Commento? Prem. OK ▲▼

Risultato del test con il suggerimento di controllare i livelli dei chetoni.

14 Set 02 9:30
35
mg/dL
Spuntino?
Commento? Prem. OK ▲▼

14 Set 02 9:30
1.9
mmol/L
Spuntino?
Commento? Prem. OK ▲▼

Risultato dei test tra 20 e 70 mg/dL (1.1–3.9 mmol/L) con promemoria per pasto o spuntino.

ATTENZIONE
BASSA GLICEMIA
Inf. 20 mg/dL

ATTENZIONE
BASSA GLICEMIA
Inf. 1.1 mmol/L

Livello di glucosio nel sangue inferiore a 20 mg/dL (1.1 mmol/L).

ATTENZIONE
ALTA GLICEMIA
Sup. 600 mg/dL

ATTENZIONE
ALTA GLICEMIA
Sup. 33.3 mmol/L

Livello di glucosio nel sangue superiore a 600 mg/dL (33.3 mmol/L).

ATTENZIONE
Batteria in esaurimento
Sostituire la batteria al più presto
Vedere il manuale

La batteria si sta scaricando. Sostituire le batterie appena possibile.

ATTENZIONE
Batteria
Sostituire la batteria immediatamente
Vedere il manuale

Batterie troppo scariche per eseguire il test. Sostituirle immediatamente.

ATTENZIONE
Lo strumento non rientra nell'intervallo di temperatura.
Test interrotto
Vedere il manuale

La temperatura dell'ambiente non rientra nel range operativo del sistema. Ripetere il test quando la temperatura dello strumento e delle strisce reattive rientra nell'intervallo operativo di 6–44°C.

ATTENZIONE
Errore 1
Chiamare il Servizio clienti
Vedere il manuale

Lo strumento presenta un problema o può essere necessario reimpostarlo. Spegnerlo lo strumento. Accedere alla modalità di impostazione. Reimpostare la lingua, la data e l'ora. Reimpostare il codice dello strumento. Se il messaggio Errore 1 continua, non usare lo strumento. Contattare il Servizio Clienti LifeScan Italia/Svizzera. Vedere il retro per le informazioni sul Servizio Clienti.

ATTENZIONE
Errore 2
Problema strum. o strisce
Ripetere il test
Vedere il manuale

La striscia reattiva inserita è già usata o lo strumento presenta un problema. Ripetere il test con una nuova striscia reattiva.

ATTENZIONE
Errore 3
Strumento non pronto
Ripetere il test
Vedere il manuale

Applicazione del campione di sangue o della soluzione di controllo prima della visualizzazione sul display di "Applica sangue", "Sito alternativo" o "Soluzione di controllo". Ripetere il test con una nuova striscia reattiva.

ATTENZIONE
Errore 4
Problema con la striscia
Ripetere il test
Vedere il manuale

Tre possibili cause:

- 1) è possibile che la glicemia sia alta e che il test sia stato eseguito in un ambiente la cui temperatura bassa sia vicina al limite inferiore del range operativo 6–44°C. Ripetere il test in un ambiente più caldo; oppure,
- 2) la striscia reattiva è danneggiata o si è spostata durante il test. Ripetere il test con una striscia reattiva nuova; oppure,
- 3) il campione è stato applicato in maniera non corretta. Ripetere il test con una nuova striscia reattiva, applicando correttamente il campione di sangue.

ATTENZIONE
Errore 5
Test non valido
Ripetere il test
Vedere il manuale

Striscia reattiva danneggiata o finestra di conferma non piena. Eseguire il test nuovamente con una nuova striscia reattiva.



Aggiunta di un commento ai risultati del test

8 Set 02 10:30
135
mg/dL
Commento? Prem. OK ▲▼

8 Set 02 10:30
7.5
mmol/L
Commento? Prem. OK ▲▼

FASE 1

Completare il test del sangue.

Iniziare con il risultato del test sul display.



FASE 2

Premere il pulsante OK.

È possibile aggiungere un commento su dieta, stato di salute o attività fisica.

8 Set 02 10:30
Glic 135 Commento

Dieta	Post colazione
Salute	-----
Attività	-----
Salva	-----

8 Set 02 10:30
Glic 7.5 Commento

Dieta	Post colazione
Salute	-----
Attività	-----
Salva	-----

FASE 3

Selezione del tipo di commento.

Usare **8** per evidenziare il tipo e premere **OK**.

8 Set 02 10:30
Glic 135 Commento

Dieta	-----
Salute	Stress
Attività	Sintomi ipo
Salva	Malattia
	Mestruaz.

8 Set 02 10:30
Glic 7.5 Commento

Dieta	-----
Salute	Stress
Attività	Sintomi ipo
Salva	Malattia
	Mestruaz.

FASE 4

Aggiunta di un commento.

Selezionare il commento dal menu. Premere **OK** con il commento evidenziato.

8 Set 02 10:30
Glic 135 Commento

Dieta	Pre pranzo
Salute 1	Stress
Salute 2	-----
Attività	-----
Salva	-----

8 Set 02 10:30
Glic 7.5 Commento

Dieta	Pre pranzo
Salute 1	Stress
Salute 2	-----
Attività	-----
Salva	-----

FASE 5

Salvataggio del commento.

Scorrere fino a "Salva". Premere **OK**.

Impostazione di base dello strumento



FASE 1

Accesso alla modalità d'impostazione.

Premere e mantenere premuti assieme i pulsanti **8** e **OK** per tre secondi.

Set up in?

- English
- Español
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Português
- Nederlands

FASE 2

Selezione della lingua di visualizzazione.

Per usare l'inglese, premere **OK**. Per usare un'altra lingua, scorrere fino ad essa con **8**. Premere **OK**.

Impostazione di base

Ora 0:00

Data 15 Set 02

FASE 3

Impostazione di data e ora.

Scorrere con **8** e premere **OK** quando i dati inseriti sono corretti.

Personalizzare lo strumento?

Si

No

FASE 4

Completamento dell'impostazione di base dello strumento.

Selezionare "NO" e premere **OK**. L'impostazione di base dello strumento è completa. Selezionare "Si" e premere **OK** per personalizzare altre impostazioni dello strumento. Per ulteriori dettagli, vedere il libretto d'istruzioni.

Creazione di un'annotazione del diario

Premere lo SmartButton™ per digitare un'annotazione del diario (attività fisica, stato di salute, terapia o cibo).




Attività fisica Salute Terapia Cibo

**Nota: è importante che l'ora del giorno sia esatta e che la terapia e gli orari dei pasti siano impostati secondo il programma quotidiano personale. In caso contrario, alcune informazioni dei FastFacts™ non saranno corrette.*

Accesso al diario dell'utente

Per richiamare i risultati dei test nella memoria del diario usare FastFacts™.

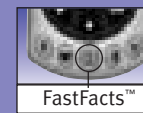

FASE 1

Accesso a FastFacts™.

Premere lo SmartButton™ FastFacts™.

FastFacts

- Diario
- Glicemia ai pasti
- Analisi glicemia
- Assunzione insulina
- Info ipo
- Medie cibo
- Controlli salute

FASE 2

Selezionare "Diario" dal menu.

Premere **OK**.

Diario

8 Set 02 10:30

Glic 125 mg/dL

Pre pranzo

Prima Attività

Diario

8 Set 02 10:30

Glic 6.9 mmol/L

Pre pranzo

Prima Attività

FASE 3

Scorrere i risultati.

Per scorrere, usare **8**.

Diario

15 Set 02 15:30

Attiv. fisica

Intensa 00:10

Guida rapida

*Importante: prima di eseguire il test, leggere le istruzioni dettagliate contenute nel libretto d'istruzioni di OneTouch™ UltraSmart™.

