

Calibrazione dello strumento

Calibrare lo strumento quando lo si utilizza per la prima volta e, in seguito, ogni volta che si utilizza un nuovo flacone di strisce reattive OneTouch® Ultra®.

ATTENZIONE: per risultati accurati, è importante che il codice presente sullo strumento e quello riportato sul flacone delle strisce reattive corrispondano. Ogni volta che si esegue il test, accertarsi che i numeri di codice corrispondano.



FASE 1 Accesso alla modalità di calibrazione.

Inserire una striscia reattiva per accendere lo strumento. Apparirà "OneTouch UltraSmart", seguito dal codice.




FASE 2 Osservazione del numero di codice.

Sullo schermo appare il numero di codice.



FASE 3 Corrispondenza dei codici.

Confrontare il codice presente sullo schermo dello strumento con quello indicato sul flacone delle strisce reattive. Se corrispondono, avviare il test. In caso contrario, passare alla Fase 4.

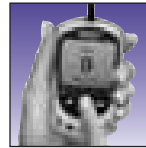


(Esempio)

FASE 4 Calibrazione dello strumento.

Scorrere su o giù con il pulsante freccia . Lo strumento è pronto per il test.

Riepilogo del test

Nota: prima di eseguire il test, lavarsi le mani con acqua calda e sapone. Risciacquare e asciugare accuratamente.

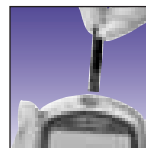


FASE 1 Inserimento della striscia reattiva.

Spingere con decisione finché non si ferma. Lo strumento si accende automaticamente.




ONETOUCH
UltraSmart

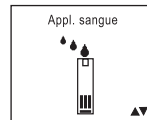



FASE 2 Selezione della modalità di test.

Con il pulsante freccia selezionare "Appl. sangue" per il campione prelevato dal polpastrello o "Sito alternativo" per campioni di sangue da avambraccio/palmo. **Non** selezionare la modalità Soluzione di controllo quando si esegue il test del sangue. Un errore nella selezione della corretta modalità di test può comportare la rilevazione errata delle medie relative alla glicemia.

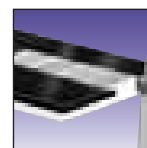


FASE 3 Applicazione del campione.

Toccare e mantenere la goccia di sangue sul canale capillare del margine superiore della striscia reattiva.

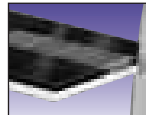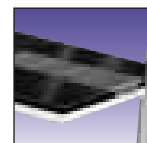


FASE 4 Riempimento della finestra di conferma.

Prima del conteggio alla rovescia dello strumento, accertarsi che la finestra di conferma sia piena. Se la finestra non è piena prima che lo strumento inizi il conteggio alla rovescia, ripetere il test con una nuova striscia reattiva. **Non** aggiungere altro sangue; gettare la striscia reattiva e ripetere il test.

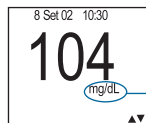

(Esempio)

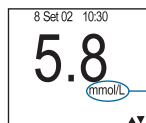

(Esempio)


FASE 5

Risultati accurati in soli 5 secondi.

AVVERTENZA: se mg/dL o mmol/L* non appare con il risultato del test, contattare il Servizio Clienti LifeScan Italia/Svizzera. Vedere il retro per le informazioni sul Servizio Clienti.

*In Italia, l'unità standard di misura è: mg/dL. In Svizzera l'unità standard di misura è: mmol/L.

Simboli e messaggi dello schermo

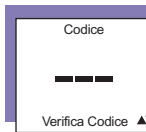

Verifica Codice

- 1) Nuovo strumento senza codice di calibrazione. Inserire il codice dello strumento; oppure
- 2) l'alimentazione dello strumento si è brevemente interrotta e si è attivata la modalità di impostazione. Inserire nuovamente il codice di calibrazione.




(Esempio)




(Esempio)

Risultato del test con il suggerimento di controllare i livelli dei chetoni.


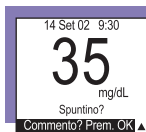


(Esempio)


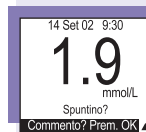


(Esempio)


Risultato dei test da 20 e 59 mg/dL (1.1 - 3.3 mmol/L) con promemoria per pasto o spuntino.

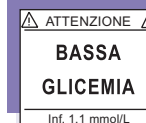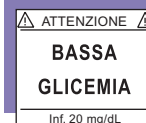


Livello di glucosio nel sangue inferiore a 20 mg/dL (1.1 mmol/L).

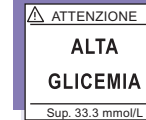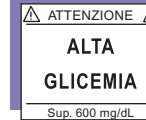


Livello di glucosio nel sangue superiore a 600 mg/dL (33.3 mmol/L).

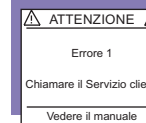

Potrebbe trattarsi di un problema relativo allo strumento.
1) Spegnerlo lo strumento. Accedere alla modalità di impostazione. Reimpostare lo strumento prima di eseguire il test; oppure
2) spegnere lo strumento. Accedere alla modalità di impostazione. Reimpostare lingua, data, ora e codice strumento. Se il messaggio Errore 1 continua, **non** usare lo strumento. Chiamare il **Servizio Clienti LifeScan Italia/Svizzera** per la sostituzione dello strumento. **Vedere il retro per le informazioni sul Servizio Clienti.**

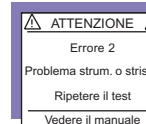

La striscia reattiva inserita è già usata o lo strumento presenta un problema. Ripetere il test con una striscia reattiva nuova.

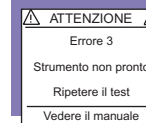

Applicazione del campione di sangue o della soluzione di controllo prima della visualizzazione sul display di "Applica sangue", "Sito alternativo" o "Soluzione di controllo". Ripetere il test con una striscia reattiva nuova.



Servizio Clienti LifeScan:
Italia Numero Verde: 800 822000
Svizzera Numero Verde: 0800 850 905

Visitate il sito web de LifeScan:
Italia/Svizzera: www.lifescan.it




©2006 LifeScan, Inc. Milpitas, CA 95035
Rev. date: 8/2006 AW 061-580-20A




AW 06158020A

CH/IT/QRG/OUS

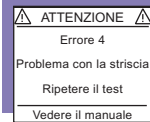

Tre ragioni possibili:


- 1) è possibile che la glicemia sia alta e che il test sia stato eseguito in un ambiente ad una temperatura bassa, vicina al limite inferiore dell'intervallo operativo del sistema (6-44°C). Eseguire nuovamente il test in un ambiente più caldo, oppure
- 2) campione applicato in maniera non corretta. Ripetere il test con una nuova striscia reattiva, applicando correttamente il campione di sangue, oppure
- 3) striscia reattiva danneggiata o spostata durante il test. Ripetere il test con una striscia reattiva nuova.

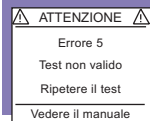


- 1) Striscia reattiva danneggiata o finestra di conferma non piena. Eseguire il test nuovamente con una nuova striscia reattiva.
- 2) potrebbe trattarsi di un problema relativo allo strumento. Se il messaggio di errore persiste, chiamare il Servizio Clienti LifeScan Italia/Svizzera. Vedere il retro per le informazioni sul Servizio Clienti.



La batteria si sta scaricando. Sostituire le batterie appena possibile.


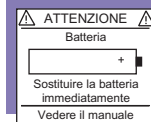


Batteria troppo scarica per eseguire il test. Sostituirla immediatamente.

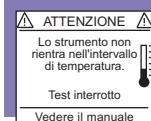

La temperatura non rientra nel range operativo del sistema. Non si può effettuare un test finché lo strumento e le strisce reattive non raggiungono una temperatura che rientri nell'intervallo operativo (6-44°C).

Aggiunta di un commento ai risultati del test

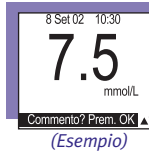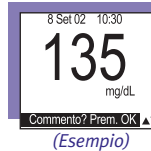

FASE 1 Completamento del test del sangue.

Iniziare con il risultato del test sul display.



FASE 2 Premere il pulsante OK.

È possibile aggiungere un commento su cibo, stato di salute o esercizio fisico.



FASE 3 Selezione del tipo di commento.

Usare per evidenziare il tipo e premere .



FASE 4 Aggiunta di un commento.

Selezionare il commento dal menu. Premere con il commento evidenziato.




FASE 5 Salvataggio di un commento.

Scorrere fino a "Salva". Premere .

Creazione di una voce del diario

Premere lo SmartButton® per digitare una voce del diario elettronico (esercizio fisico, stato di salute, farmaci o cibo).

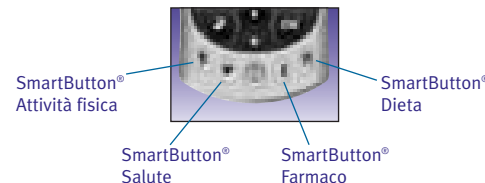

Impostazione di base dello strumento




FASE 1 Accesso alla modalità di impostazione.

Premere e mantenere premuti **ASSIEME** i pulsanti e per almeno due secondi.




FASE 2 Selezione della lingua.

Per usare l'inglese, premere . Per usare un'altra lingua, scorrere fino ad essa con . Premere .

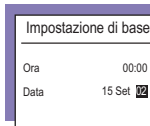

FASE 3 Impostazione di data e ora.

Scorrere con e premere quando i dati inseriti sono corretti.

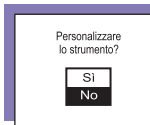


FASE 4 Completamento dell'impostazione di base dello strumento.

Selezionare "No" e premere . L'impostazione di base dello strumento è completa. Selezionare "Sì" e premere per personalizzare altre impostazioni dello strumento. Per ulteriori dettagli, vedere il manuale d'istruzioni e il riquadro successivo.*

Accesso al diario dell'utente

Per esaminare i risultati del test nella memoria del diario usare FastFacts®

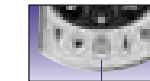

FASE 1 Accesso a FastFacts®.

Premere lo SmartButton® FastFacts®.



FASE 2 Selezione di "Diario" dal menu.

Premere .



FASE 3 Scorrere i risultati.

Per scorrere, usare .



***Nota:** è importante che l'ora del giorno sia corretta e che i farmaci e gli orari dei pasti siano impostati secondo il programma quotidiano personale. In caso contrario, alcune informazioni del FastFacts® non saranno corrette.

ONE TOUCH UltraSmart

Glucometro e diario elettronico insieme



Guida rapida

Vedere all'interno per le istruzioni sull'uso del OneTouch® UltraSmart®.

Importante: prima di eseguire il test, leggere le istruzioni dettagliate contenute nel Manuale d'istruzioni del OneTouch® UltraSmart®.