


Krew lub roztwór kontrolny zostały pobrane przed pojawieniem się symbolu . Powtórzyć badanie, stosując nowy pasek.



Pasek testowy został poruszony w trakcie badania lub otrzymany wysoki wynik poziomu cukru został przeprowadzony w zbyt niskiej temperaturze zewnętrznej. Powtórzyć badanie, stosując nowy pasek.




Poziom glukozy we krwi poniżej 20 mg/dL.



Poziom glukozy we krwi powyżej 600 mg/dL.



System był używany przy temperaturach spoza zakresu pracy (12–42°C).

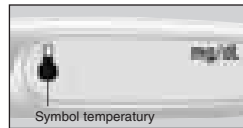

Glukometr nie został zakodowany. Wróć do 1 kroku procedury pomiaru.



Ten napis ukaże się, jeśli nie zostały do tej pory zapamiętane żadne wyniki badań (Przejdź do sekcji – Tryb pamięci).



Niskie napięcie baterii. Należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta LifeScan tel. na numer infolinii 0801 23 23 23.



Jeśli ponownie wystąpi ten sam problem, proszę skontaktować się z Działem Obsługi Klienta LifeScan tel. 0801 23 23 23.



AW 06402501A

© LifeScan, Inc. 2005
Rev: 05/2005

ONETOUCH® Horizon®

Skrócona instrukcja obsługi



Ważne: Proszę przeczytać Podręcznik Użytkownika OneTouch® Horizon® przed rozpoczęciem testów.


Uwaga: Przed rozpoczęciem testów należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. Następnie dobrze je oplukać i wytrzeć.

 **LIFESCAN**
a Johnson & Johnson company


PROCEDURA BADANIA

1) Włożyć pasek testowy i wsunąć go do końca.




2) Zanim pojawi się symbol  należy upewnić się, czy kod na wyświetlaczu jest zgodny z kodem na opakowaniu pasków testowych. Jeśli są takie same, proszę przejść do punktu 4; jeśli nie — do punktu 3.



3) Zanim pojawi się symbol  używając przycisku, ustaw prawidłowy kod pasków testowych.




4) Pojawienie się symbolu  oznacza, że glukometr jest gotowy do badania.



5) Pobrać próbkę krwi.



6) Nałożenie próbki: należy nałożyć próbkę przez dotknięcie kroplą krwi obszaru pomiarowego na pasku testowym.

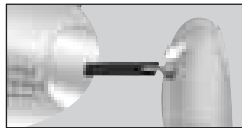

7) Wynik otrzymuje się w ciągu 5 sekund (przykładowy wynik poniżej).



TRYB PAMIĘCI


1) Aby przejść do trybu pamięci nie włączaj glukometru i nie wprowadzaj paska testowego.



2) Naciśnij przycisk włączający glukometr. Na wyświetlaczu pojawi się wynik ostatniego pomiaru (przykład poniżej).



3) Aby opuścić tryb pamięci i wyłączyć glukometr naciśnij przycisk.

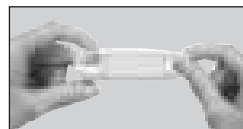

WYŚWIETLANE KOMUNIKATY

Możliwe uszkodzenie glukometru. Wyjąć pasek lub wyłączyć glukometr. Uruchomić glukometr ponownie.



Uszkodzenie glukometru lub paska testowego. Należy powtórzyć badanie stosując nowy pasek.

